



耳掛け式不織布マスク

MDJ50-L・MDJ50-S



調節可能な
ノーズフィッター

つけごこの良い
立体設計
Ωプリーツ型マスク

マスクは感染（侵入）を完全に防ぐものではありません。



細菌飛沫
捕集効率



ウイルス飛沫
捕集効率



微粒子
捕集効率

※試験機関：（一財）カケンテストセンター
※数値はフィルタ部の測定値であり保証値ではありません。

高性能不織布 3層構造フィルタ

Line Up

ふつうサイズ MDJ50-L



サイズ：約17.5cm×約9cm

50枚入

使い捨てタイプ

小さめサイズ MDJ50-S



サイズ：約14.5cm×約9cm

50枚入

使い捨てタイプ

耳掛け式不織布マスク



MDJ50-L・MDJ50-S

プリーツを開いた時に山型になる面が外側です。

使用方法



マスク上部の
ノーズフィットピース
を鼻の形に合わせ、
ひもを両耳に
掛けます。



顔とマスクの間に隙間が
できないように、
プリーツを上下に伸ばし、
位置を調節します。

※マスクを外す際は、
マスクの表面に
触れないように外し、
廃棄してください。

使用上の注意等

- 細かい粉じんや油などは浸透しますのでご注意ください。また、化学物質や有害物質への防護性能はありませんので、それらを取扱う作業には使用しないでください。
- 万一、本製品の使用でかゆみなどの症状が発生した場合や、臭いで気分が悪くなった場合は、使用を中止してください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 可燃性のため、高熱・火気にご注意ください。
- 本製品は1回使い切りタイプです。洗濯はしないでください。

ふつうサイズ MDJ50-L



(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示

品名	マスク (不織布マスク MDJ50-L)
対象	かぜ・花粉・ホコリ等
素材	本体: ポリプロピレン 耳ひも部: ポリエステル・ポリウレタン ノーズフィットピース: ポリエチレン
サイズ	約17.5cm×約9cm
カラー	白
入数	50枚入
販売者	メディケア・ジャパン株式会社 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7 TEL 03-3865-3019 FAX 03-3861-2485
包装材	外装: 紙 内袋: ポリエチレン

JANコード: 4573595990019

小さめサイズ MDJ50-S



(一社) 日本衛生材料工業連合会自主基準による表示

品名	マスク (不織布マスク MDJ50S)
対象	かぜ・花粉・ホコリ等
素材	本体: ポリプロピレン 耳ひも部: ポリエステル・ポリウレタン ノーズフィットピース: ポリエチレン
サイズ	約14.5cm×約9cm
カラー	白
入数	50枚入
販売者	メディケア・ジャパン株式会社 〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7 TEL 03-3865-3019 FAX 03-3861-2485
包装材	外装: 紙 内袋: ポリエチレン

JANコード: 4573595990026

メディケア・ジャパン株式会社

〒111-8623 東京都台東区蔵前4-13-7
TEL 03-3865-3019 FAX 03-3861-2485